


GUIDE D'APPLICATION

CINQ MINUTES AVANT L'INSERTION


Nettoyez et désinfectez l'applicateur dans une solution antiseptique non irritante

- ▶ Chlorhexidine
- ▶ Povidone iodée
- ▶ Ammonium quaternaire


Solution antiseptique

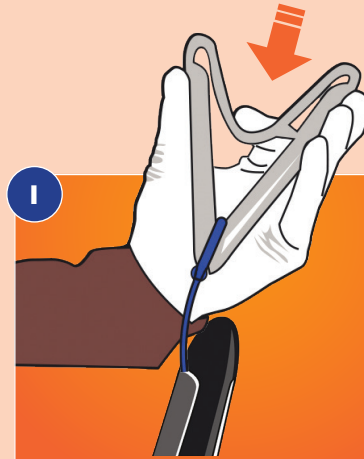


1 Pliez le dispositif PRID® DELTA avant de l'insérer dans l'applicateur (portez des gants).

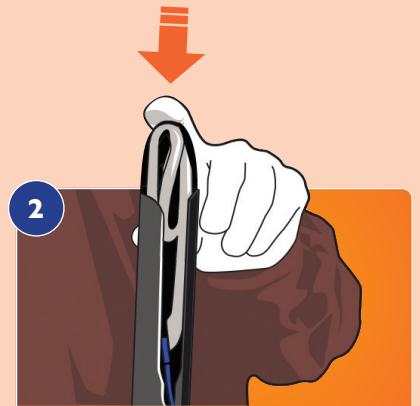


2 Poussez le dispositif à l'intérieur de l'applicateur jusqu'au bout. Assurez-vous que la tige rigide du dispositif s'étend à l'extérieur, le long de l'applicateur.

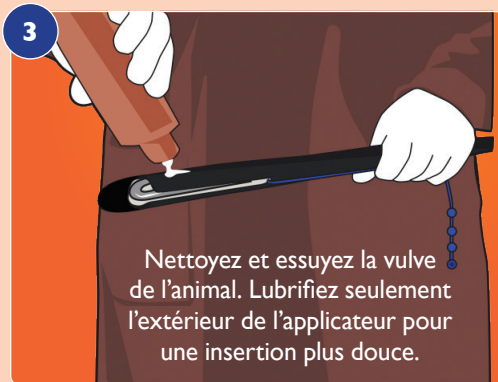

3 Nettoyez et essuyez la vulve de l'animal. Lubrifiez seulement l'extérieur de l'applicateur pour une insertion plus douce.

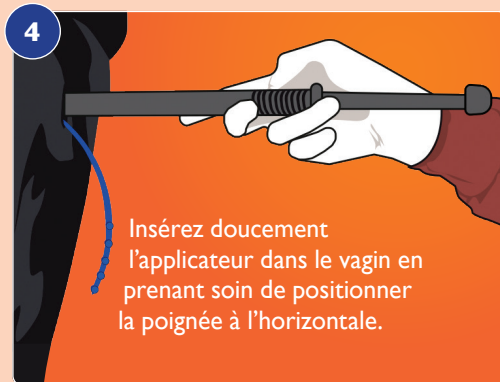


4 Insérez doucement l'applicateur dans le vagin en prenant soin de positionner la poignée à l'horizontale.

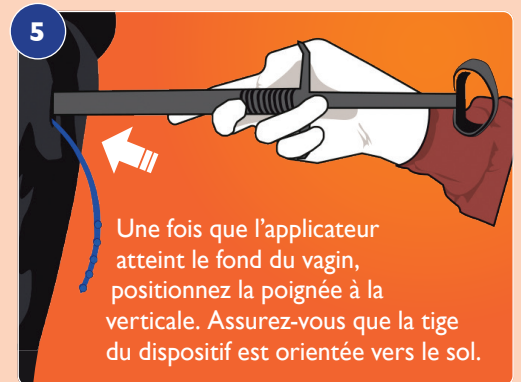


5 Une fois que l'applicateur atteint le fond du vagin, positionnez la poignée à la verticale. Assurez-vous que la tige du dispositif est orientée vers le sol.



6 Appuyez doucement sur la poignée pour libérer le dispositif, puis retirez doucement l'applicateur.

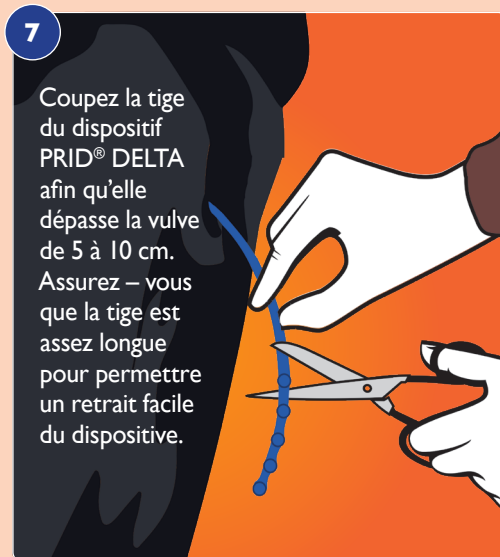

7 Coupez la tige du dispositif PRID® DELTA afin qu'elle dépasse la vulve de 5 à 10 cm. Assurez-vous que la tige est assez longue pour permettre un retrait facile du dispositif.

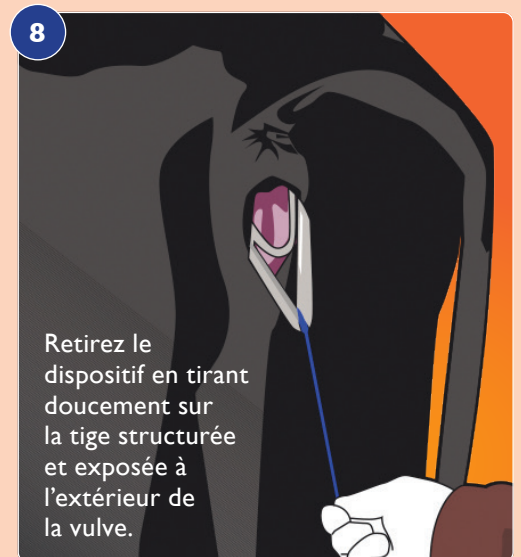

8 Retirez le dispositif en tirant doucement sur la tige structurée et exposée à l'extérieur de la vulve.

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE VÉTÉRINAIRE OU AVEC CEVA POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.